

Teknisk brukerveiledning

Enbrel® MyClic®

25 og 50 mg ferdigfylt penn




Forberede en injeksjon med MyClic*



Vent i 15-30 minutter til oppløsningen har nådd romtemperatur.
* 25 og 50 mg ferdigfylte penner har forskjellig utseende, men bruksanvisningene er den samme for begge.

Valg av injeksjonssted

- Anbefalt injeksjonssted er midt på låret foran. Se pakningsvedlegg for alternative injeksjonssteder.
- Hver injeksjon bør gis minst 3 cm fra det forrige injeksjonsstedet.
- Ikke injiser i øm, blåmerket eller hard hud. Unngå områder med arr eller strekkmerker.

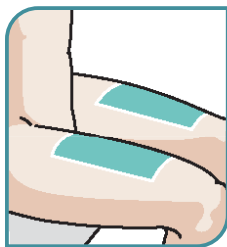

Hvis du har spørsmål om hvordan man injiserer, kontakt lege eller sykepleier for hjelp.

Instruksjonsvideo

- Scan QR-kode
- Eller
- Gå inn på www.felleskatalogen.no
(Søk opp "Enbrel" og klikk på "Instruksjonsfilmer")




Les pakningsvedlegget som ligger i MyClic-pakningen før bruk

1

Forberedelse:


Vask injeksjonsstedet med en spritserviett.

Fjern den hvite kanylehetten ved å trekke den rett av.

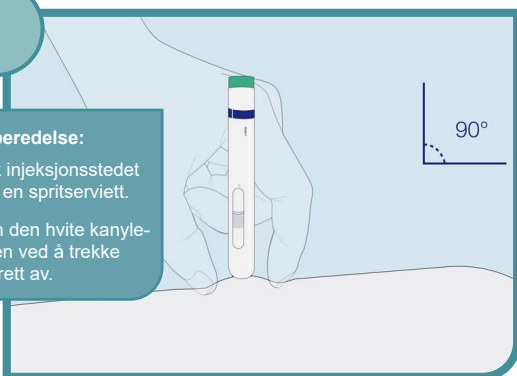


Hold pennen i rett vinkel på injeksjonsstedet og press bestemt ned den åpne enden av pennen ned mot huden inntil du ikke ser den lilla kanylebeskyttelsen lenger.

2

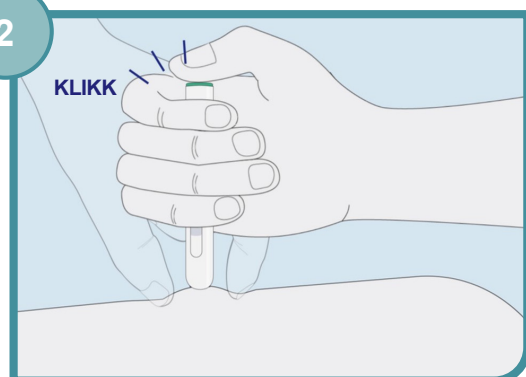

Injeksjonen kan gjøres uavhengig av når en trykker på knappen; man kan trykke ned knappen før eller etter at pennen trykkes ned mot huden. Du vil høre et klikk når injeksjonen starter.

3

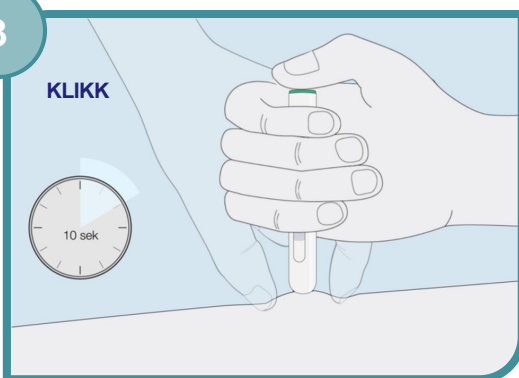


Fortsett å holde pennen mot huden. Når du hører det andre klikket eller det har gått 10 sekunder er injeksjonen ferdig.

4

Inspeksjonsvinduet skal ha blitt lilla.

Lilla kanylebeskytter stikker ut og dekker kanylen.

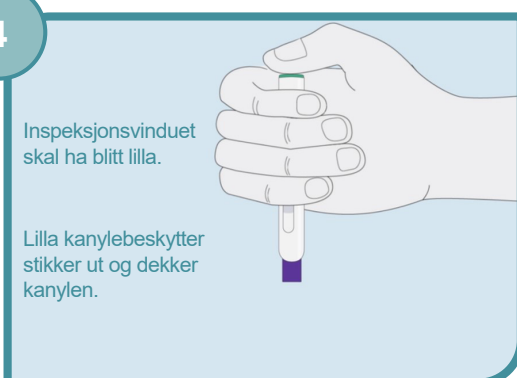

Du kan nå fjerne pennen fra huden din.